


STEP-HEAR™ sesli yönlendirme sistemini seçtiğiniz için teşekkür ederiz. STEP-HEAR™, iki üniteden oluşur: Hava koşullarına dayanıklı bir verici ve küçük bir aktivatör. Kurulum sonrası verici düzenli sinyaller yayar. Kullanıcının taşıdığı aktivatör kapsama alanına girdiği zaman titreşim ve sesli uyarı vermeye başlar. Kullanıcı aktivatörün düğmesine bastığında vericide kayıtlı sesli mesaj okunur. Bu şekilde sistem, görme engellilere buldukları yer ve çevreleri hakkında gerekli bilgileri iletir.

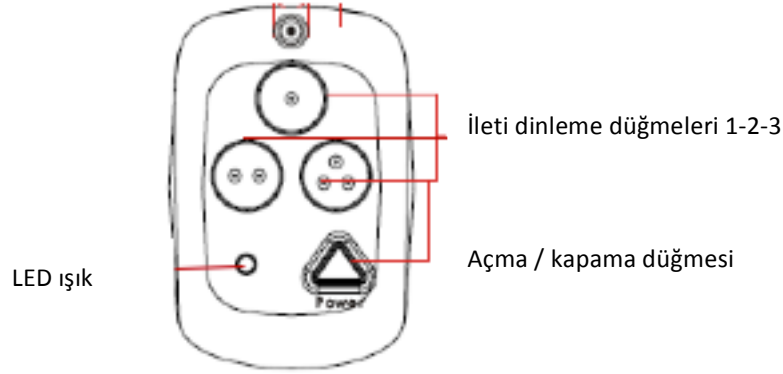

Aktivatörü şarj etme:

Şarj aletini elektriğe bağlayın. Şarj aletindeki kırmızı LED ışık yanacaktır. Aktivatörü şarj aletine yerleştirin. Aktivatörün yeşil LED ışığı yanacak, aktivatör bir kez titreşim ve sesli uyarı verecektir. Aktivatör şarj olduğunda yeşil ışık söner.

Not: Aktivatör ışığı 60 saniyede bir yanıp sönmeye ve sesli uyarı vermeye başladığında şarj durumu düşük anlamına gelir. Şarj süresi yaklaşık 2 saattir. Aktivatör stand-by süresi yaklaşık 200 saattir.

Açma – Kapama:

Aktivatör çalıştırmak için açma / kapama düğmesini 2-4 saniye basılı tutun. Kırmızı LED yanacaktır. Aktivatörü kapatmak için düğmeyi 2-4 saniye (aktivatör 2 kez ötene kadar) basılı tutun.

Aktivatörün kullanımı:

Aktivatör şarj olup çalıştırıldığında STEP-HEAR™ sistemini kullanmaya hazırsınız. Aktivatör bileğe takılabilir ya da boyunda taşınabilir.

Verici bulunan bir alana yaklaştığında aktivatör sesli ya da titreşimli uyarı verecektir. İletileri dinlemek için aktivatörün 1,2 ya da 3 no'lu düğmesine basın. Aktivatörün 1 no'lu düğmesi, vericinin 1 no'lu iletiyi tetikleyecektir.

Açma / kapama düğmesine bir kez basmak sesli / titreşimli uyarıyı geçici olarak durduracaktır. 60 saniyede bir titreşimli uyarı gelmeye devam edecektir. Aktivatör vericinin kapsama alanından çıktığında normal çalışmaya devam edecektir.

Aktivatör ayarları:

Aktivatörün varsayılan ayarı hem sesli hem de titreşimli uyarıdır. Sesli uyarıyı kapatmak için 1 ve 3 no'lu düğmeleri 5 saniye boyunca basılı tutun. Sinyal sesinden sonra sesli uyarı kapanacaktır. Sesli uyarıyı yeniden açmak için aynı işlemi tekrarlayın.

STEP·HEAR
GUIDING YOUR WAY



**GÖRME ENGELLİLER İÇİN
SES Lİ YÖNLENDİRME SİSTEMİ**

**SH-220 AKTİVATÖR
KULLANIM KILAVUZU**